


# Intra-auriculaires Alpha de Bernafon

1. Déterminez l'écouteur en fonction du degré de perte auditive

2. Ajoutez les caractéristiques techniques optionnelles

3. Trouvez le style qui convient à votre client

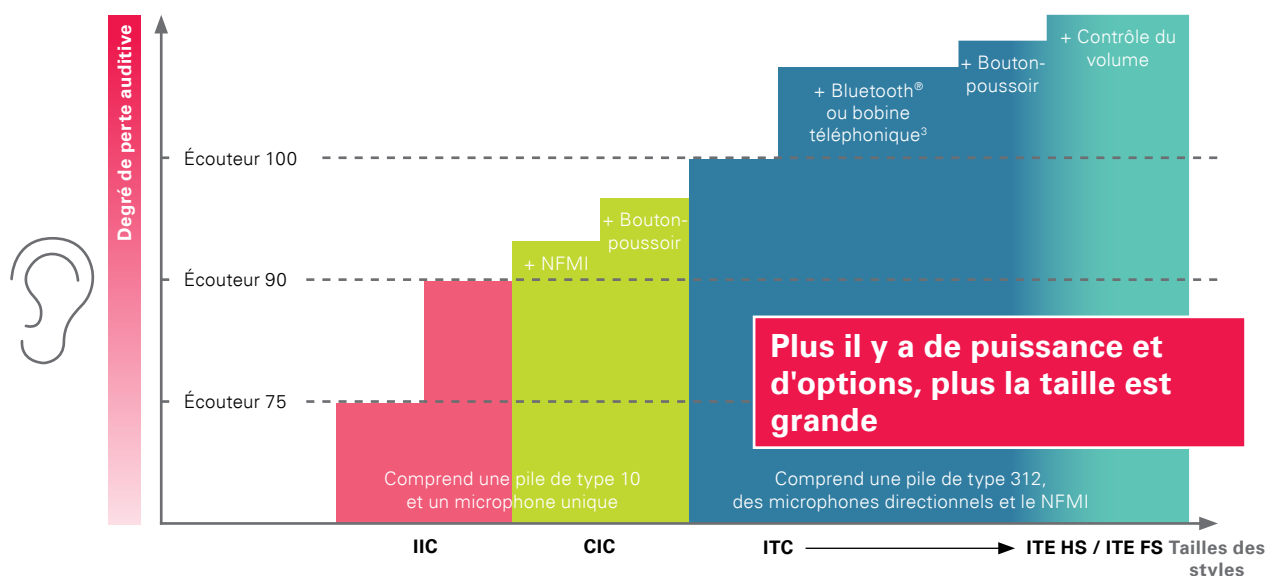

## 3 questions à poser à votre patient :

1. Les situations bruyantes sont-elles gênantes ou difficiles pour vous ?
2. Utilisez-vous le Bluetooth® ?
3. Avez-vous des difficultés à manipuler de petits objets ?

Un « Oui » à l'une des questions ci-dessus suggère le choix d'un style Alpha ITC ou ITE.


## Caractéristiques techniques<sup>1</sup>

- **Microphones** | les microphones directionnels permettent un Hybrid Noise Management™ plus avancé avec la Directivité intelligente
- **NFMI** | permet la coordination binaurale entre deux aides auditives. Le NFMI est requis pour Tinnitus SoundSupport et la Gestion du bruit binaurale.
- **Bouton-poussoir** | change de programme et règle le volume
- **Contrôle du volume** | règle le volume
- Technologie sans fil **Bluetooth® 2,4 GHz** | connecte les aides auditives à des sources audio externes et à des accessoires pour la diffusion audio.<sup>2</sup> Le Bluetooth® est nécessaire pour la communication mains libres avec les iPhone et iPad et le Renforcement des basses fréquences.
- **Bobine téléphonique** | connecte les aides auditives aux systèmes de bobine d'induction dans les lieux publics pour une meilleure audibilité


1. La disponibilité des fonctionnalités dépend du style d'aide auditive et de la taille/forme de l'oreille/du conduit auditif de l'utilisateur. Les fonctionnalités souhaitées doivent être spécifiées dans leur intégralité lors de la commande.
2. Pour obtenir des informations sur la compatibilité, consulter [bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity](http://bernafon.com/hearing-aid-users/hearing-aids/connectivity)
3. La bobine téléphonique et le Bluetooth® ne peuvent pas être tous deux inclus dans une aide auditive.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Apple Watch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et Demant A/S les utilise sous licence. Les autres marques déposées et marques commerciales sont détenues par leurs propriétaires respectifs.

# Cinq styles d'intra-auriculaires et de couleurs à assortir

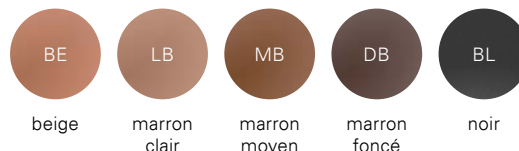


## IIC – Invisible dans le conduit

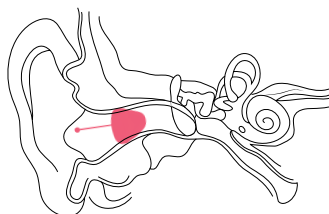

- Pile de type 10
- Microphone unique

## CIC – Complètement dans le conduit

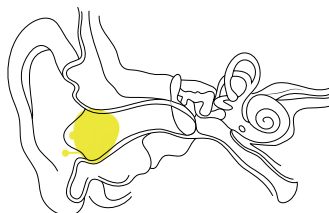


- Pile de type 10
- Microphone unique

### En option

- NFMI
- Bouton poussoir

## ITC – Dans le conduit

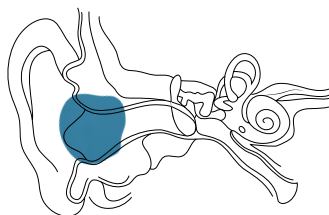


- Pile de type 312
- Microphones directionnels
- NFMI

### En option

- Bouton poussoir
- Contrôle du volume
- Bluetooth®
- Bobine téléphonique

## ITE HS – Demi-conque intra-auriculaire

## ITE FS – Conque intra-auriculaire

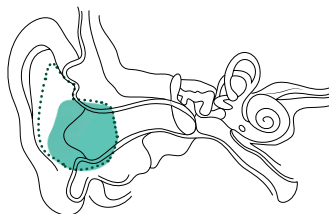

Bernafon est une marque du Groupe Demant.  
Your hearing · Our passion signifie : Votre audition · Notre passion

**bernafon**<sup>®</sup>  
Your hearing · Our passion