

CALIBREUR DE TRACHÉOSTOME  
EN SILICONE AVEC LANGUETTE  
DE PRÉHENSION

CyGripone™  
CALIBREUR DE TRACHÉOSTOME

# CyGripOne™

CALIBREUR DE TRACHÉOSTOME

Calibreur de trachéostome en silicone destiné aux personnes laryngectomisées nécessitant un calibreur après l'opération et même ultérieurement, CyGripOne™ bénéficie d'une innovation importante, une languette de préhension\*\*. Cette languette permet de le retirer et de le remettre en place aisément, notamment lorsqu'il est porté sous le nez artificiel ou ECH\* Cyranose®. Destiné avant tout à calibrer le trachéostome du patient, CyGripOne™ peut être porté soit seul, par l'intermédiaire d'une attache-canule, soit sous le nez artificiel Cyranose®.

Grâce à sa composition en silicone médical, il est extrêmement confortable à porter et ne vient pas blesser la muqueuse trachéale du patient lors de sa mise en place ou de son retrait quotidien. Epousant avec souplesse les mouvements du cou, il n'entraîne aucune gêne dans la vie quotidienne du laryngectomisé. A noter que le design de la languette de préhension a été spécialement étudié pour faciliter la mise en place et le retrait de ce calibreur, aussi bien par le patient lui-même que par le personnel soignant, avec ou sans Cyranose®. Proposé en plusieurs longueurs et plusieurs diamètres pour s'adapter à toutes les tailles de trachéostome, CyGripOne™ existe également en version «fenêtré» pour les patients porteurs d'un implant phonatoire, afin de permettre le passage de l'air dans celui-ci lors de l'occlusion du trachéostome durant la phonation.

## Les + de CyGripOne™

### ► **Durant l'hospitalisation :**

CyGripOne™ peut être utilisé avec la protection trachéale jetable Tracheoclean®.

### ► **De la sortie de l'hôpital à la fin de la cicatrisation et de la radiothérapie :**

CyGripOne™ peut être utilisé avec la protection trachéale jetable Tracheoclean®.

### ► **Après la fin de la radiothérapie :**

Pour les patients qui doivent continuer à porter, habituellement ou occasionnellement, un calibreur, CyGripOne™ peut être utilisé avec :

- Cyranose®, nez artificiel ou Échangeur de Chaleur et d'Humidité.
- CyValve Freedom™ par l'intermédiaire de CyAdaptor™, valve pour phonation mains libres.

## Les principaux **AVANTAGES** de CyGripOne™


- **Souplesse, confort hors-pair et réelle douceur** grâce à l'emploi du silicone.
- **Parfaite adaptation** à tous les types de trachéostome, en particulier pour les conformations morphologiques difficiles.
- **Utilisation parfaitement compatible** avec les séances de radiothérapie.
- **Possibilité de « pré-fenêtrage »** pour les patients équipés d'un implant phonatoire.
- **Mise en place et retrait aisés** grâce à la languette de préhension.\*\*

\*Échangeur de Chaleur et d'Humidité

\*\* Brevet Déposé



La languette de préhension\*\*  
Une innovation signée Ceredas

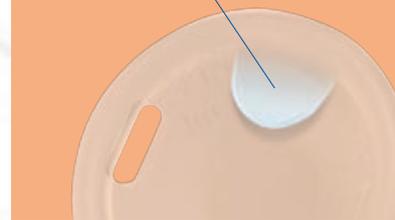

# CyGripOne™

CALIBREUR DE TRACHÉOSTOME




DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES				
	L mm	Taille 8 Ø int. 9,5 mm Ø ext. 12 mm	Taille 9 Ø int. 10,5 mm Ø ext. 13,5 mm	Taille 10 Ø int. 12 mm Ø ext. 15 mm	Taille 12 Ø int. 13,5 mm Ø ext. 17 mm
 <b>CyGripOne™</b> Calibreur de trachéostome • Standard	18	CNS0818	CNS0918	CNS1018	CNS1218
	27	CNS0827	CNS0927	CNS1027	CNS1227
	36	CNS0836	CNS0936	CNS1036	CNS1236
	55	CNS0855	CNS0955	CNS1055	CNS1255
 <b>CyGripOne™</b> Calibreur de trachéostome • Fenêtré	18	CNSF0818	CNSF0918	CNSF1018	CNSF1218
	27	CNSF0827	CNSF0927	CNSF1027	CNSF1227
	36	CNSF0836	CNSF0936	CNSF1036	CNSF1236
	55	CNSF0855	CNSF0955	CNSF1055	CNSF1255



# Cyranose®

## GLOBAL SYSTEM

### SOLUTION GLOBALE POUR LA RÉHABILITATION PULMONAIRE ET PHONATOIRE APRÈS LARYNGECTOMIE TOTALE

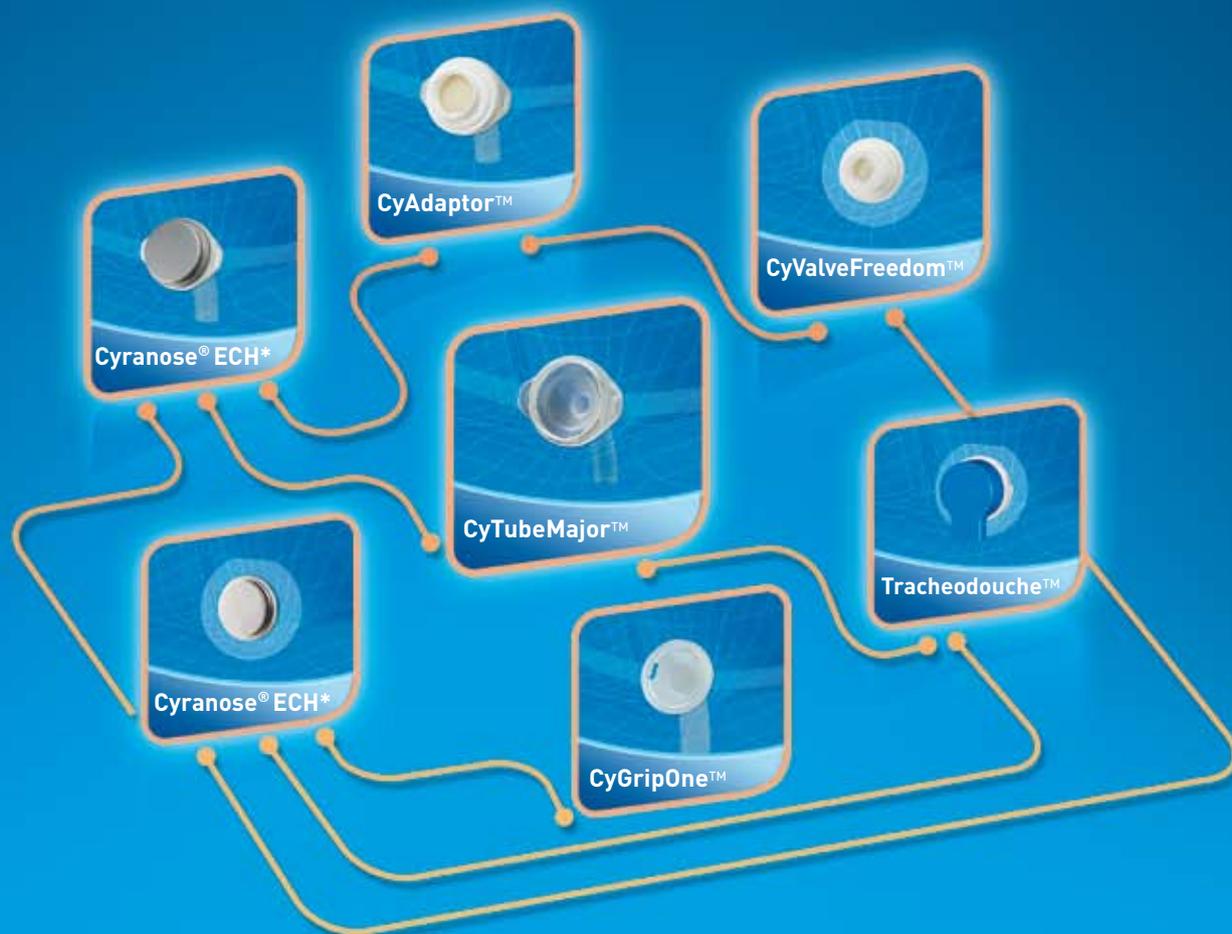

**C**yrano<sup>®</sup> Global System réunit une gamme de dispositifs destinée aux praticiens et aux patients laryngectomisés pour la réhabilitation pulmonaire et phonatoire de ces derniers, porteurs ou non d'un implant phonatoire.