


Digivox

L'audiométrie vocale pour Windows

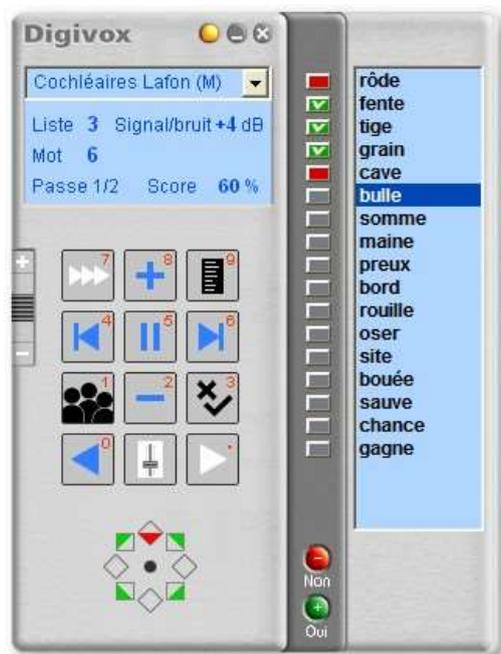

Simplement plus efficace !

Tests d'intelligibilité vocale dans le silence et dans
le bruit

Maîtrise de l'environnement sonore

Contrôle du rapport signal/bruit



Digivox est un lecteur de listes vocales pour l'audiométrie. Il permet d'effectuer des tests dans le silence et dans le bruit.

Pour l'audiométrie vocale, l'intérêt de l'utilisation de listes enregistrées n'est plus à démontrer, c'est en particulier une condition impérative pour garantir la reproductibilité des tests. Les CD-audio assurent cette fonction, mais leur manipulation reste contraignante.

Listes disponibles

Avec Digivox, vous disposez de l'intégralité des listes vocales en langue française enregistrées en 2006 par Audivimédia et publiées par le Collège National d'Audioprothèse.


Les mots sont émis au rythme des réponses du patient. Un mode automatique permet de les émettre à une cadence régulière réglable. Il est toujours possible de répéter un mot en cas de besoin.



Audiométrie vocale dans le bruit

Trois types de bruit sont proposés : un cocktail party, un speech noise et un ISTS noise. Vous avez accès direct au réglage du rapport signal/bruit. Une commande de pause permet de suspendre le bruit à tout instant, pour dialoguer avec le patient par exemple.

Exemples de configuration

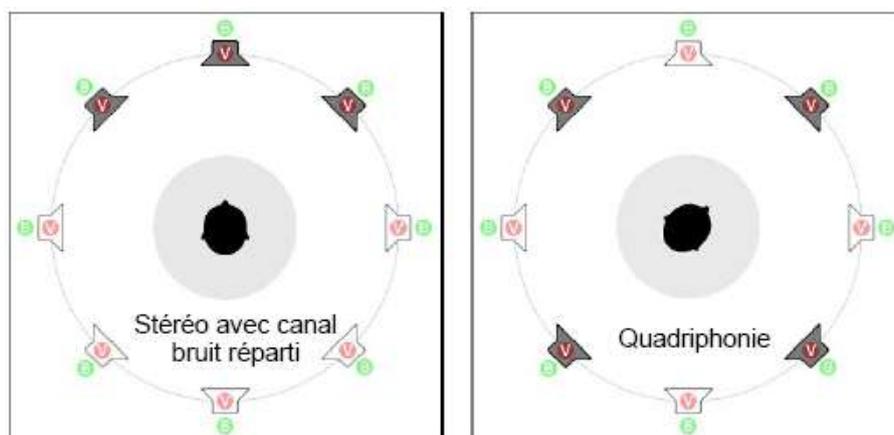



Matériel

Les possibilités d'adaptation de Digivox à votre équipement de cabine en font un outil pratiquement universel.

Digivox exploite le système de haut-parleurs existant, qu'il soit monophonique, stéréophonique, quadriphonique, surround 5.1 ou surround 7.1.

Bien entendu, un système surround permet de mieux répartir dans l'espace les bruits masquants qu'un ensemble stéréophonique, et à fortiori monophonique.

Digivox fonctionne sur tout ordinateur PC équipé de Windows XP ou Vista, Windows 7 et 8 et d'une carte son compatible avec Windows.

Interface



Digivox est conçu pour vous apporter la plus grande efficacité grâce à son interface simple et complète.

La plupart des commandes de Digivox sont directement accessibles à partir du clavier numérique de l'ordinateur. Ainsi un clavier numérique externe avec ou sans fil constitue une télécommande très pratique (et très économique).

Pour faciliter la localisation des commandes, les boutons du pupitre de Digivox reproduisent la disposition des touches du clavier numérique.



Audivimedia
Logiciels & Audition

Audivimedia SARL

48 rue Montmartre - 75002 Paris

+33 (0)1 44 76 84 44

contact@audivimedia.fr

www.audivimedia.fr